



VERARBEITUNGSANLEITUNG CREATION FLÜSSIGE BRENNWATTE

STABILER HALT AUF DEM BRENNGUTTRÄGER

Die flüssige Brennwatte von Creation Willi Geller für alle Creation-Systeme dient zum sicheren Fixieren des Objekts auf dem feuerfesten Träger. Sie ist durch ihre sämige Konsistenz einfach zu applizieren und härtet beim Brennvorgang formstabil aus. Gleichzeitig erfolgt eine optimale Hitze-/Wärmeverteilung auf das Objekt beim Brand.





AUFTRAGEN

Die Brennwatte wird direkt aus der Spritze in die Krone appliziert bzw. auf das Presskeramikobjekt aufgetragen und dann vorsichtig auf den Stift des Brenngutträgers aufgesetzt.

BRENNEN

Im Keramikofen härtet das spezielle Material vollständig aus und stabilisiert so die zahntechnische Arbeit während des Brennvorgangs – ein sicherer Stand auch für Inlays, Onlays und Veneers, hergestellt z.B. aus der neuen vielseitigen Presskeramik Creation CP.

Technische Fragen: technic@creation-willigeller.com
Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Änderungen können jederzeit erfolgen.

ENTFERNEN

Nach dem Brand kann die ausgehärtete Paste unter fließendem Wasser schnell und rückstandslos mit einem Instrument wieder beseitigt werden. Falls nötig wird abschließend mit Glanzperlen und max. 2 bar Druck ausgestrahlt.

Bei Verwendung von Creation LF-Verblendmaterialien muss ein Kontakt mit der Brennwatte unbedingt vermieden werden!

LAGERUNG

Die flüssige Brennwatte sollte luftdicht verschlossen, kühl und trocken gelagert werden.

Vertreiber

Creation Willi Geller International GmbH
Koblacherstraße 3, 6812 Meiningen, Austria
Tel. +43 (0)5522 76784
Fax. +43 (0)5522 73699
info@creation-willigeller.com
www.creation-willigeller.com

Hersteller

KLEMA Dentalprodukte GmbH
Koblacherstr. 3a, 6812 Meiningen, Austria