



MODE D'EMPLOI OUATE DE CUISSON LIQUIDE

FIXATION STABLE SUR LE PLATEAU DE CUISSON

La ouate de cuisson liquide de Creation Willi Geller pour tous les systèmes Creation aide à fixer l'objet avec précision sur la plaque de cuisson à l'épreuve du feu. Il s'applique aisément grâce à sa consistance crémeuse et offre une excellente stabilité de forme quand il durcit pendant la phase de cuisson. Simultanément, la chaleur est parfaitement répartie sur l'objet pendant la cuisson.





APPLICATION

La ouate de cuisson est appliquée directement à la seringue dans la couronne ou sur l'objet en céramique pressée et ensuite posé précautionneusement sur la tige de la plaque de cuisson.

CUISSON

Dans le four à céramique, ce matériau spécial durcit entièrement et stabilise ainsi l'ouvrage de technique dentaire pendant la cuisson – un support qui s'avère également idéal pour les inlays, les onlays, les couronnes et les incrustations vestibulaires.

Questions technique: technic@creation-willigeller.com

Sous réserve d'erreurs d'impression. Peut être modifié sans préavis.

ÉLIMINATION

Après la cuisson, la pâte solidifiée peut être éliminée aisément et entièrement sous l'eau courante à l'aide d'un instrument sans laisser de résidus. Au besoin, elle peut finalement être éliminée par sablage au moyen de perles à polir sous une pression maximale de 2 bars.

Lors de l'utilisation de matériaux d'incrustation Creation LF, il est absolument essentiel d'éviter tout contact avec la ouate de cuisson.

ENTREPOSAGE

La ouate de cuisson liquide doit être entreposé dans un lieu frais et sec, dans son emballage sous vide.

Distributeur

Creation Willi Geller International GmbH
Koblacherstraße 3, 6812 Meiningen, Austria
Tel. +43 (0)5522 76784
Fax. +43 (0)5522 73699
info@creation-willigeller.com
www.creation-willigeller.com

Fabricant

KLEMA Dentalprodukte GmbH
Koblacherstr. 3a, 6812 Meiningen, Austria