

Creation LS Press

Lithiumdisilikat

Creation LS

Verblendkeramik für Lithiumdisilikat



CREATION LS – Verblendkeramik für Lithiumdisilikat

Creation LS – weil Ästhetik zählt!

Creation LS ist eine eigens für Creation LS Press entwickelte Verblendkeramik. Sie besteht aus einer amorphen Glasmatrix, die mit Feldspat angereichert ist. Dadurch erhält Creation LS eine natürlich wirkende Trübung, die der des natürlichen Zahns sehr ähnlich ist.

Das Farbsortiment der Schichtkeramik folgt dem bewährten Konzept von Willi Geller und somit dem der bestehenden Creation-Verblendkeramiken. Dadurch lassen sich die Creation LS Press-Restaurationen nach dem gewohnten Schichtkonzept verblenden.



CREATION LS / LS PRESS

Ein System, ein Ziel - Ästhetik!

Creation LS/LS Press ist ein keramisches System für die Herstellung und Verblendung von vollkeramischen Restaurationen aus Lithiumdisilikat und einer amorphen Glaskeramik.

Die Presskeramik Creation LS Press und die dazugehörige Verblendkeramik Creation LS folgen der seit mehr als 30 Jahren be-

währten Philosophie von Creation Willi Geller, dem Zahntechniker hochwertige Werkstoffe zur Herstellung von individuellem und natürlich schönem Zahnersatz an die Hand zu geben.



KREATIVE FREIHEIT MIT PRESSKERAMIK!

Creation LS Press

Creation LS Press-Rohlinge werden in einem speziellen technischen Verfahren hergestellt, bei dem Lithiumdisilikat-Kristalle in eine Glasmatrix eingeschlossen werden. Die Besonderheit ist die gleichmäßige Verteilung und der hohe Füllungsgrad von mikrokristallinem Lithiumdisilikat. Das Ergebnis sind überragende physikalische Materialeigenschaften und eine natürliche Ästhetik der Restaurationen.



- Hohe Festigkeit durch homogene Kristallstruktur: > 500 MPa
- Minimalinvasive Präparation: 0,3mm (Veneer), 0,8mm (Frontzahn)
- Kreative Freiheit bei der Herstellung: Vollverblendung, Teilverblendung, Cut-back, Microlayering, Maltechnik
- Große Indikationsbreite: Inlays, Onlays, Veneers, Okklusale Veneers, Verblendgerüste, Monolithische Restaurationen, Verblockte Kronen
- Umfassendes Farb- und Transluzenzspektrum

Creation LS Press Color Chart

Produktbezeichnung	Transluzenz-Kodierung	Empfohlene Anwendungstechnik	Ergänzende Hinweise
Creation LS Press MO	Medium Opacity	Herstellung von Gerüsten zur Vollverblendung	Entspricht in etwa der Opazität von Opakdentinen oder Zirkonoxid-Gerüsten der 1. Generation
Creation LS Press LT	Low Translucency	Teilverblendete Kronen oder Cut-back-Technik	Entspricht der Opazität von Dentin oder Transition Dentin
Creation LS Press MT	Medium Translucency	Vollanatomische Restaurationen für die Maltechnik oder Micro-layering (dünne Schneide für verbesserte Ästhetik)	Mittlere Transluzenz, Trübungsgrad zwischen Dentin und Zahnschmelz
Creation LS Press HT	High Translucency	Inlays, Onlays, Veneers, Okklusale Veneers	Hohe Transluzenz, vergleichbar mit Zahnschmelz

Creation LS Press Farbuordnungstabelle

Zahnfarbe Vita®-Shade	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
MO Medium Opacity	MO-1		MO-2			MO-1		MO-2		MO-1		MO-2				
LT Low Translucency	LT-A LT-A1	LT-A LT-A2	LT-A LT-A2/-A3		LT-A LT-A3	LT-B0 LT-B1	LT-B	LT-B	LT-B LT-A3	LT-C LT-B1	LT-C LT-A1	LT-C	LT-C	LT-D	LT-D	LT-D
MT Medium Translucency	MT-A1	MT-A2	MT-A2/-A3		MT-A3	MT-B0 MT-B1	MT-B2	MT-B2	MT-A3	MT-B1	MT-A1	MT-D2	MT-D2	MT-D2	MT-D2	MT-A2
HT High Translucency	HT-2		HT-3		HT-4	HT-1	HT-3			HT-4	HT-3		HT-4		HT-3	

Massen, die nicht in Relation zum Vita®-Farbschlüssel stehen:

Bleach	MO-0	LT-B00	LT-B0	MT-B00	MT-B0	HT-B00	HT-B0	
--------	------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--

INSPIRIERENDES FARBSPEKTRUM

Der Natur ganz nah!

Orale Ästhetik entsteht mit einer Keramik, die die richtigen Farbtöne und genügend Farbsättigung aufweist und den Restaurationen eine natürlichen Lichtbrechung, ausreichend Helligkeit, Opaleszenz und Fluoreszenz verleiht. Creation LS erfüllt all diese

Kriterien, ist speziell auf die Verblendung von Creation LS Press Rohlingen abgestimmt und gibt dem Keramiker die individuelle Freiheit bei der Herstellung naturgetreuer Restaurationen.



Christian Vordermayer, Oral Design

DAS SAGEN PROFIS

Pressen, verblenden und individualisieren mit Lithiumsilikat!



„Die neue Presskeramik Creation LS Press und die Schichtkeramik Creation LS sind für mich die perfekte Materialkombination für die effiziente Herstellung von Restaurationen aus Lithiumdisilikat. Selbst nach mehreren Bränden bleiben der Helligkeitswert und der Farbton der Presskeramik stabil und führen zu vorhersehbaren Ergebnissen. Dies ermöglicht eine sehr effiziente Herstellung von ästhetischen Restaurationen, die durch exzellente optische Eigenschaften wie Transluzenz, Fluoreszenz und Opaleszenz überzeugen.“

Sonia Cattazzo, Oral Design



„Mit Creation LS gibt es nun endlich eine Verblendkeramik für Lithiumdisilikat, die mir ein weites Spektrum für die Herstellung natürlich wirkender Restaurationen bietet. Das Farbkonzept entspricht dem der bewährten Creation Keramiken, mit herausragender Lichtreflexion, viel Helligkeit und starken, dynamischen Farben. Die Kombination aus Creation LS Press und Creation LS bietet mir viele Vorteile für meine tägliche Arbeit und erleichtert mir die Herstellung lebendig wirkender Restaurationen.“

Sebastien Mosconi, Oral Design



„Ich bin beeindruckt von den Ergebnissen, die ich mit der neuen Creation LS Verblendkeramik erreichen kann. Die Schichtmassen bieten verschiedene Transluzenzgrade wie Opakdentine, Dentine, verschiedene Schmelz- und Effektmassen und darüber hinaus die Möglichkeit, mit der internen Maltechnik großartige Effekte zu erzielen. Ich schätze die hohe Helligkeit und die Fluoreszenz der Pressrohlinge, die zu einer natürlichen Wirkung im Patientenmund führen. Ich werde Creation LS definitiv in meinem Labor verwenden!“

Javier Perez, Oral Design



FÜR EINEN GUTEN START



Creation LS Intro Kit A1, A2 | 830081



Creation LS Intro Kit A3 | 830082



Creation LS Starter Kit, Bleach, A1, A2, A3 | 830080



Creation LS Kit | 830083



WILLI GELLER
Creation

Vertreiber:
CREATION WILLI GELLER INTERNATIONAL GMBH
Koblacherstraße 3
6812 Meiningen, Austria
Tel. +43 5522 76784
www.creation-willigeller.com

CREATION WILLI GELLER DEUTSCHLAND GMBH
Harkortstraße 2
58339 Breckerfeld, Germany
Tel. +49 2338 801 900
www.creation-willigeller.de

Technische Fragen:
technic@creation-willigeller.com

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler.
Änderungen können jederzeit erfolgen.