

Creation Magic Colour

Lorsque le travail des hommes prend le relai la technologie



UN ENSEMBLE DE COLORANTS ...

... pensé pour les prothésistes

La fabrication numérique de restaurations monolithiques est sûre et efficace. Mais Magic Colour a été créé pour améliorer le résultat du point de vue esthétique. Ce système simple et concis réconcilie parfaitement les technologies modernes de production avec le savoir-faire manuel du prothésiste.

L'esthétique sans compromis


Magic Colour sert à l'accentuation et à la caractérisation des restaurations monolithiques en zircone ou en disilicate de lithium. Creation a opté pour un mélange poudre-liquide afin de laisser libre cours à des techniques de travail diversifiées et son utilisation en est d'autant plus simple : en se mélangeant au liquide Magic Colour GL, les poudres prennent l'aspect de pâtes compatibles avec une application efficace en fines couches dont le résultat est visible instantanément.

Une brillance naturelle tout en profondeur

Que ce soit pour caractériser une armature ou pour une utilisation en micro-stratification, Magic Colour est le point de départ d'un nouvel univers esthétique. En outre, la micro-stratification utilisée en zone antérieure avec Creation ZI-F (sur zircone) ou avec Creation LS (sur disilicate de lithium), procurera une esthétique et une brillance tout en profondeur. Grâce à Magic Colour, chaque céramiste conservera sa propre signature.

Magic Colour brille par ces différents aspects :

- Techniques d'application multiples grâce au concept poudre-liquide.
- Possibilité de caractériser tous types de restaurations stratifiées, pressées ou usinées en zircone ou en disilicate de lithium.
- Soutien des teintes des céramiques stratifiées.
- Maquillage d'armatures, combiné ou non avec de la micro-stratification.
- Aspect lumineux naturel grâce à la fluorescence inhérente à la finesse de la granulométrie.

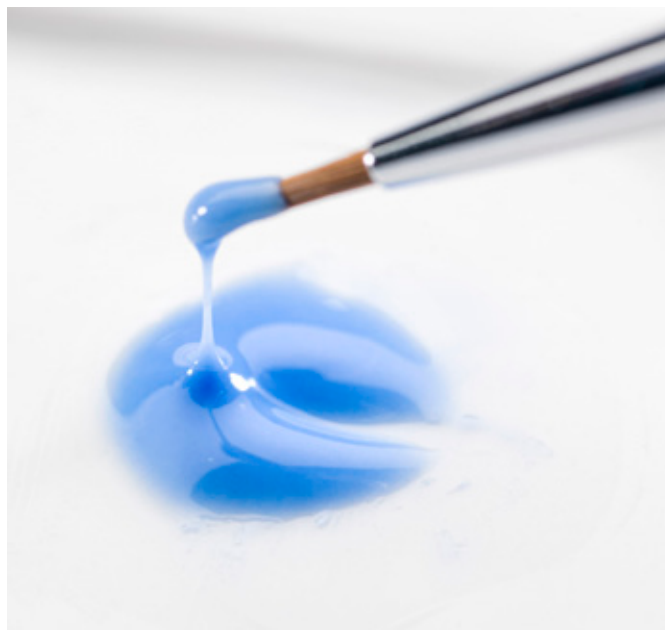

SYSTÈME CREATION MAGIC COLOUR

Creation Magic Colour est un système composé de produits prévus pour la caractérisation individuelle de restaurations dentaires.

Composants du système : Domaines d'application :

Magic Colour – Dentine Shade

Adaptation aux teintes selon le référent Vita A–D



Magic Colour – Glaze

Pour un éclat naturel



Magic Colour – Make In

Pour la réalisation de mamelons



Magic Colour – Gingiva Shade

Pour la reproduction naturelle de la gencive




Magic Colour – Liquid

Pour un montage consistant



Le liquide Magic Colour GL est prévu pour être mélangé à nos maquillants en poudre.

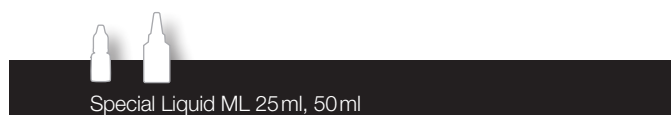

Le liquide spécial Magic Colour ML a été spécialement développé pour la micro-stratification avec Creation ZI-F et Creation LS. La céramique n'en est que plus consistante tout en restant compatible avec une application en fines couches. Sa haute densité et sa faible rétraction préservent le glaçage même après la cuisson.

Magic Colour – Highlight

Pour donner encore plus de liberté lors de la caractérisation des teintes.



CREATION MAGIC COLOUR ASSORTIMENT

Magic Colour Professional Kit I 001205

Ce kit contient tout les maquillants existants ainsi que les glasures et les liquides, pour la réalisation des couronnes et de la fausse gencive.



Dentine Shade		
1	DS-A	3g
1	DS-B	3g
1	DS-C	3g
1	DS-D	3g
Highlight		
1	HL-1 white	3g
1	HL-2 eggshell	3g
1	HL-3 lemon yellow	3g
1	HL-4 mandarine	3g
1	HL-5 flamingo	3g
1	HL-6 apricot	3g
1	HL-7 light brown	3g
1	HL-8 medium brown	3g
1	HL-9 olive	3g
1	HL-10 red	3g
1	HL-11 dove blue	3g
1	HL-12 grey	3g
1	HL-13 deep blue	3g
1	HL-14 fissure	3g
1	HL-15 illusion	3g

Make In		
1	MI-61 ivory	3g
1	MI-63 honey yellow	3g
Gingiva Shade		
1	GS-1 raspberry	3g
1	GS-2 salmon red	3g
1	GS-3 red violet	3g
Glaze		
1	Glaze Fluo	3g
1	Glaze	3g
Liquid		
1	Liquid GL	50 ml
1	Special Liquid ML	50 ml
Brush		
1	Brush	

Magic Colour Starter Kit ZI-F I 001206

Ce kit contient les masses et les liquides les plus courants pour la réalisation de couronnes, ainsi que deux masses nécessaires à la micro-stratification de la zircone avec Creation ZI-F.



Dentine Shade		
1	DS-A	3g
1	DS-B	3g
Highlight		
1	HL-1 white	3g
1	HL-4 mandarine	3g
1	HL-6 apricot	3g
1	HL-8 medium brown	3g
1	HL-9 olive	3g
1	HL-11 dove blue	3g
Make In		
1	MI-63 honey yellow	3g
Ceramic		
1	ZI-F Transpa NT neutral	20g
1	ZI-F Transpa OT	20g

Glaze		
1	Glaze Fluo	3g
1	Glaze	3g
Liquid		
1	Liquid GL	25 ml
1	Special Liquid ML	25 ml
Brush		
1	Brush	



CE QU'EN DISENT LES PROS

Magic Colour Starter Kit LS I 001207

Ce kit contient les masses et les liquides les plus courants pour la réalisation de couronnes, ainsi que deux masses nécessaires à la micro-stratification du disilicate de lithium avec Creation LS.



Dentine Shade	
1 DS-A	3g
1 DS-B	3g

Highlight	
1 HL-1 white	3g
1 HL-4 mandarine	3g
1 HL-6 apricot	3g
1 HL-8 medium brown	3g
1 HL-9 olive	3g
1 HL-11 dove blue	3g

Make In	
1 MI-63 honey yellow	3g

Ceramic	
1 LS Transpa NT neutral	20g
1 LS Transpa OT	20g

Glaze	
1 Glaze Fluo	3g
1 Glaze	3g

Liquid	
1 Liquid GL	25 ml
1 Special Liquid ML	25 ml

Brush	
1 Brush	



La gamme Magic Colour comprend toutes les nuances de teintes dont j'ai besoin pour maquiller mes couronnes et mes fausses gencives. Le concept poudre-liquide me permet d'adapter la consistance de mon mélange à chaque cas, ce qui influence aussi l'intensité des couleurs. Ces maquillants sont parfaits pour une application directe sur l'armature ou pour la micro-stratification. Magic Colour me procure beaucoup de liberté dans la réalisation de mes restaurations monolithiques et le résultat est visible à l'œil nu.



Stefan Picha – Oral Design



Magic Colour m'a ouvert de nouveaux horizons dans le domaine des restaurations monolithiques. Les maquillants s'appliquent facilement, même en très fines couches, et les effets obtenus sont très naturels. Magic Colour reste stable après cuisson et la qualité des états de surface est impressionnante. Il est possible de pousser l'esthétique encore plus loin grâce à la micro-stratification. Deux cuissons suffisent à obtenir une haute esthétique et la caractérisation se veut encore plus efficiente.



Alexander Conzmann – Oral Design



WILLI GELLER
Creation



Distributeur:
CREATION WILLI GELLER INTERNATIONAL GMBH
Koblacherstraße 3
6812 Meiningen, Austria
Tel. +43 5522 76784
www.creation-willigeller.com

CREATION WILLI GELLER NORTH AMERICA
3737 W 127th Street
Alsip IL, 60803
United States
Phone: 1-800-323-2164
Info-NorthAmerica@Creation-Willigeller.com

Questions techniques :
technic@creation-willigeller.com

Sous réserve de fautes d'impression.
Sous réserve de modifications à tout moment.